


Návod k použití

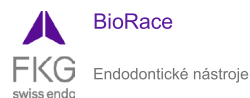



Další informace na www.fkg.ch



FKG REF. - 99.7AA.10.14A.XX - notice n°103 - 2015/06

BioRace

popis

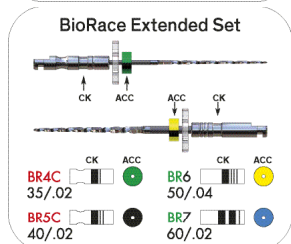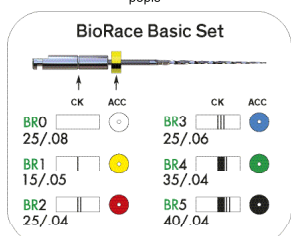

CK/ACC - najdete na www.fkg.ch

Označení hloubky ▲ (v milimetrech)
K dispozici v délce 21 / 25 / 31 mm

Příklad na nástroji 25 / 31 mm



Pravidla:

Počet otáček: 600/minutu – točivý moment: 1 Ncm

> Maximálně 3-4 jemné pohyby dopředu a dozadu.

> Lehká ruka, nechte nástroj pracovat.

> Pracujte po dobu 3-4 sekund, nástroj pak vytáhněte ven, očistěte fezné hrany a kanálek propláchněte.

BioRace Basic Set (základní set)

1 balení obsahuje: 1 x BR0, 1 x BR1, 1 x BR2, 1 x BR3, 1 x 1 BR4, 1 x BR 5

Nejdříve si připravte volný přístup, pak propláchněte kanálek a dřeňovou dutinu.

1. BR0 - pouze 4 jemné dotyky - vyčistěte nástroj.

• Opakujte tak dlouho, až je připravená koronální část kanálu v délce 4-6 mm.

• Po skončení práce s BR0 kanálek vypláchněte.

• Pokračujte dále do pracovní délky, použijte ruční pilník ISO 15.

• Kanálek a dřeňovou dutinu vypláchněte vyplachovacím roztokem.

2. Použijte BR1, 4 jemné dotyky.

Pokud tento nástroj nedosáhne do pracovní délky, nástroj očistěte a pokračujte, dokud není pracovní délka dosažená.

3. Použijte BR2 a BR3 stejným způsobem, jak je popsáno u BR1. BR3 NEPOUŽÍVEJTE do celé pracovní délky u kanálu v případě, kdy je kanálek apikálně hodně zakřivený.

V tomto případě postupujte podle bodu 1 protokolu BioRaCe Extended Set.

4. Použijte BR4 a BR5 stejným postupem, jako BR1-3.

Většinou se takto dosáhne finální apikální přípravy.

5. U větších kanálků (viz anatomická tabulka na www.fkg.ch) postupujte dále podle bodu 3 protokolu BioRaCe Extended Set.

BioRace Extended Set (rozšířený set)

1 balení obsahuje: 1 x BR4C, 1 x BR5C, 1 x BR6, 1 x BR7

1 U **velkých apikálních zakřivení** použijte pro přípravu apikálního kanálku nástroje BR4C a BR5C.

Pokud se po 4 jemných dotycích nedosáhne těmito nástroji do pracovní délky, na nástroj NETLAČTE. Kanálek propláchněte a postup opakujte.

2. U komplikovaných zakřivení se doporučuje použít další nástroje FKG (např. S-Apex, ScoutRace nebo ruční pilníky).

3. U **velkých kanálků** lze z rozšířeného Bio-Race setu použít dva dodatečné nástroje BR6 a BR7, a to způsobem jak bylo uvedeno pro BR1-5.

Poznámka: Pro bezpečné a účinné používání nástrojů je bezpodmínečně nutné, aby se nástroje po 4 kontaktech důkladně propláchly a vyčistily. Protokol pro sterilizaci zdravotnických prostředků pro opakované použití.

Protokol pro sterilizaci zdravotnických prostředků pro opakované použití

Nesterilní výrobky První použití

Postupujte přesně podle níže uvedených doporučení čištění a sterilizace

Sterilní výrobky První použití

1. Otevřete obal
2. Vytáhněte nástroj (musíte přitom používat rukavice)
3. Nástroj použijte podle správné stomatologické praxe

Druhé použití:

Postupujte přesně podle níže uvedených doporučení.

Druhé a další použití.

Čištění

Nástroj manuálně očistěte, můžete také použít ultrazvuk. Důkladné očištění zvýší účinnost desinfekce a sterilizace.

2. Opláchnutí

Pod destilovanou/demineralizovanou vodou po dobu aspoň 1 minuty. Nástroje pak osušte.

3. Kontrola

Zkontrolujte stav nástrojů a poškozené nebo opotřebované nástroje vyřadte.

4. Balení

Nástroje položte na vhodnou podložku a pak je vložte do sterilizačního obalu ISO 11607-1.

Sterilizace

5. Podle protokolu EN/ISO 17664

Autokláv: 134°C/273°F,
2,2 po dobu 18 min.

6. Skladování

Nástroje skladujte ve sterilizačních obalech na suchém a čistém místě.

Vždy postupujte podle pokynů výrobce pro cyklus a délku trvání

Druhé a další použití

7. Předběžná desinfekce

Pod použití ponořte nástroje do čistícího roztoku a eventuálně je ručně očistěte kartáčkem.

8. Opláchnutí

Pod tekoucí vodou po dobu aspoň 1 minuty. Nástroje pak osušte.

9. Pokračujte podle výše uvedených bodů 1-6.

Úplný provozní protokol a upozornění najdete na www.fkg.ch

Všeobecné informace

Předběžná desinfekce/desinfekce NEPOUŽÍVEJTE

roztoky obsahující:

- fenol (korozie)
- aldehyd (fixace krve)
- di-/tri-etanolaminy (korozie) (corrosion)

Sterilizace pomocí chemiklávu nebo horkovzdušného sterilizátoru

nebyla FKG Dentaire validována. Postupujte podle pokynů výrobce pro cyklus a jeho trvání. Naše nástroje jsou nicméně pro tyto metody vhodné.

Pozor:

Tento výrobek obsahuje nikl a neměl by se proto používat u lidí se známou alergickou reakcí na tento kov.



Doporučuje se použití u jednoho pacienta, aby se předešlo zkřížené kontaminaci.



FKG Dentaire SA
Crê-dû-Lode 4, CH-2304 La Chaux-de-Fonds, Switzerland
Tél: +41 22 924 22 44 Fax: +41 32 924 22 55
info@fkg.ch, www.fkg.ch